

お得意先様
担当者様

1回使い切り用
ソフトコンタクトレンズ
用消毒剤

ソフトコンタクト
レンズケア
ご提案書

医薬部外品
ソフトコンタクト
レンズ用
消毒剤



●さらなるホテル顧客満足度の向上に！ ソフトコンタクトレンズケア用品はホテルに持って行かない時代へ!!

①気付いた時にすぐ使える！ホテル内でケア用品が手配できる環境へ

あ！
またコンタクト
レンズケア用品
忘れちゃった…。
チェックインした
のにまた出るの
めんどくさいな…。



- ・「あ！忘れた!!」に対応できる用意を！
→アメニティとして客室へ
→販売品としてフロント・アメニティ置き場へ
- ・ケア用品は、
「ホテルに持ってこなくてはいけないもの」
→「ホテルにすでに用意があるもの」へ！
ホテルアメニティ用品として定着を!!

②安全性の高いケア用品を！きちんと洗浄・消毒できるケア用品です。

- ・ホテルアメニティ業界で、
「洗浄・すすぎ・消毒・保存」が可能な
MPS（マルチ・パーパス・ソリューション）
を使い切り用で提供しているのは弊社のみ！
 - ・ホテルアメニティ商材としては、現在ほかに
類似商品の無い商品です。
- ※MPSとは？1本でソフトCLに必要な洗浄・すすぎ・消毒・
保存が可能なケア用品。（医薬部外品）




● 10代～60代までの男女約30%がコンタクトレンズ使用者！

- ・ 16～60歳までの男女の**約26%がCL（コンタクトレンズ）装用者**。カラコンに関しては若年女子の9人に1人が装用中。
（GfKジャパン調べ：2016年コンタクトレンズ利用実態調査）
- ・ CL初心者が装用するファーストCLはソフトコンタクトが多い。**（約75%以上）**
（2014年CL協会調べ）
- ・ 1DAY CL（1日使い捨てCL）以外は、**MPSでのケアが毎日必要**。


● 現在アメニティ業界で使用されているケア用品

- ・ 主に液剤の内容物は**生理食塩水**。
（体液とほぼ同じ浸透圧）
- ・ 保存が主な機能であり、**消毒はできない**。
- ・ 現在、ソフトCLもハードCLもケアできる液は存在しない。
- ・ 原産国が**海外**で、使用期限も**約1年間**。

図1.アイウェア使用/併用状況

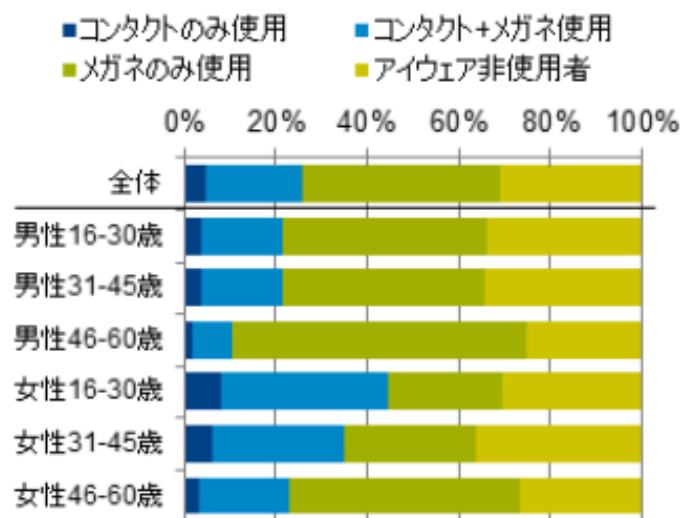


© GfK 2016

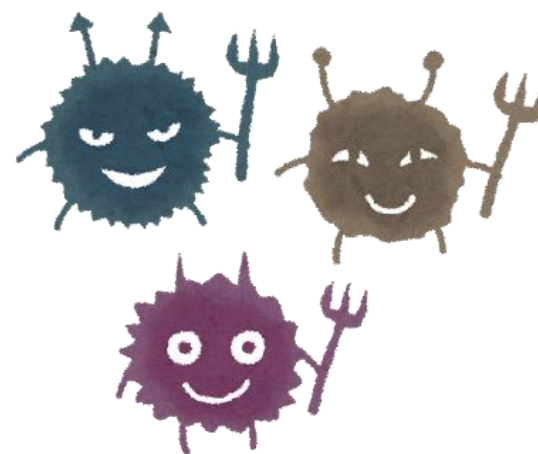

●ホテルアメニティ史上初！ 医薬部外品グレードのソフトCLケア!!

・MPSと保存液の機能範囲

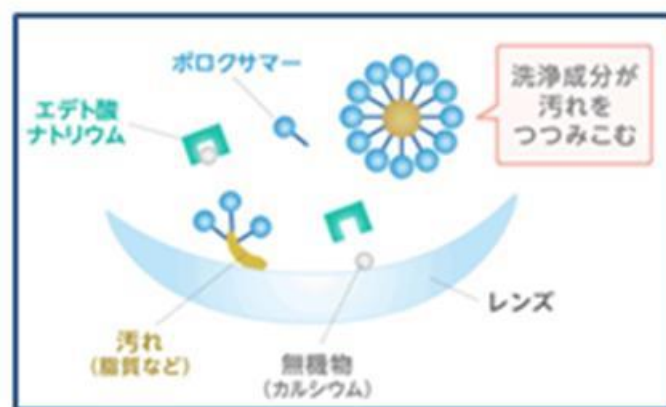

●汚れ・菌を落とすメカニズム

物質的な汚れ→ポロクサマー…タンパク質汚れなどを効果的に落とす。

エドト酸ナトリウム…カルシウム等の無機物を効果的に落とす。

細菌・真菌 → 塩酸ポリヘキサニドにより、細菌・真菌の消毒に有効。

●SCL（ソフトコンタクトレンズ）の取り扱い上気をつけたいこと

- ①SCLは水で洗えません。 ②目に入れたまま寝ないでください。 ③長時間装用していると目に負担がかかります。



・ SCLの膨張・変形の原因。
再使用不可な状態に！



・ 瞳の酸素不足。
・ 目の乾燥感・疲労感の原因にも。



・ 充血・ドライアイ・疲労感
などの原因にも。

●洗浄・消毒を怠ると、重篤な眼障害に…。

①レンズの汚れによるアレルギー 巨大乳頭結膜炎（汚れが原因）



© Japanese Ophthalmological Society

- ・ レンズの表面についた付着物などが原因で引き起こされる結膜のアレルギー反応。
- ・ 主にレンズに付着した汚れが取れきれないことが原因。
- ・ 目がかゆい、目やにがたくさん出るようになるレンズが曇りやすくなるなどの症状。

②角膜潰瘍 （真菌や細菌が原因）



© Japanese Ophthalmological Society

- ・ 角膜に傷や濁りが生じた状態。
- ・ 治療をしても、視力の著しい低下と、不正乱視が残る症状。角膜移植も必要となる、重篤な症状。発症後激痛を伴う。
- ・ 原因は真菌やアcantアメーバ、細菌やヘルペスなど。

●商品紹介

商品名：ソフトコンタクトレンズケア
(1回使い切り用ソフトコンタクトレンズ消毒剤)

商品コンセプト：**いつでも新鮮な状態で使用できるソフトコンタクトレンズ
用消毒剤セット**

商品仕様：消毒剤（12mL）×1本（1回分）
簡易レンズケース×1個
添付文書×1枚

分類：医薬部外品

販売名：ケアスター

弊社卸価格：〇〇円

使用期限：製造から3年

発注単位：〇〇個




商品説明：**軽量・個包装なのでかさばらず、使用後もゴミとして捨てられる。
密閉容器なので、充填後の液の汚染が少なく衛生的！**
ソフトコンタクトレンズの洗浄・すすぎ・消毒・保存が可能。
簡易ケース付。このセットのみでケア可能。
ケア方法は通常のMPSと同様。

●インバウンド対策も！海外の方にも使用していただける工夫も!!

①MPSの使い方は世界共通

②添付文書は英語表記完備!!

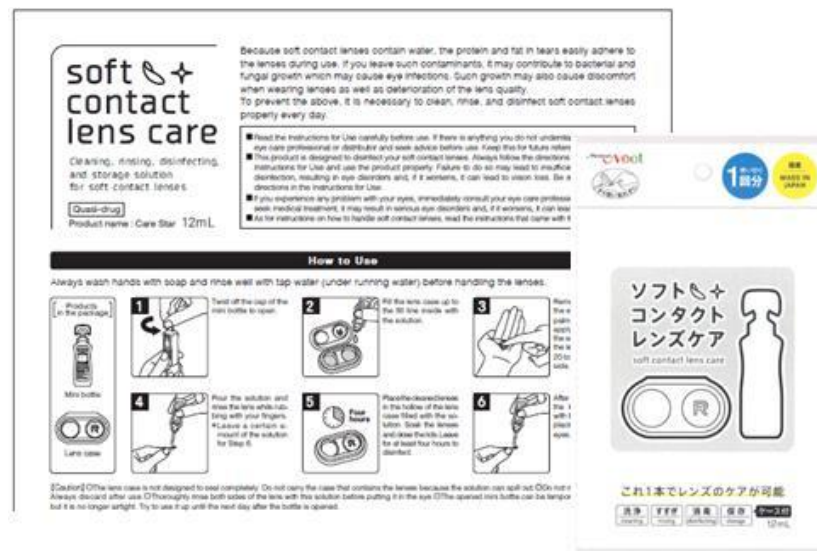

- ・ソフトCLに関して、**ケアの方法は世界共通!!**
- ・様々な国のソフトCL使用者に対応！
- ・安心の国産。

- ・添付文書（取扱説明書）は日本語と英語表記。
- ・使用方法是絵付きでわかりやすい。